


Tryptophan und Histamin im Stuhl (A410, A651, A670)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen
- 1 x Testanleitung
- 1 x Spezialabnahme-Set für Stuhl
- 1 x Stuhlfänger
- 1 x Transportumröhrchen
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag

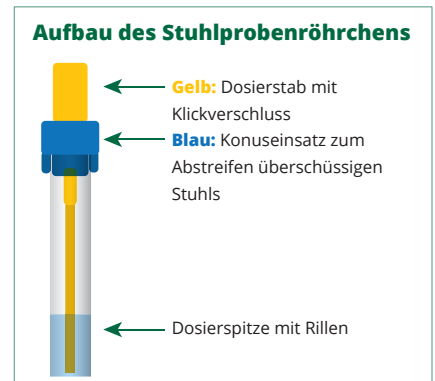

Anwendung des Röhrchens zur Stuhlprobennahme

1. Dosierstab herausziehen

Das Stuhlprobenröhrchen am **blauen Konuseinsatz** festhalten (**der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Stuhlprobenröhrchen**). Dann den **gelben Dosierstab** aufdrehen und herausziehen. **Die Flüssigkeit nicht aus dem Stuhlprobenröhrchen ausschütten!**

2. Stuhlprobe aufnehmen

Mit dem Dosierstab **3-mal** an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen. Die Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.

3. Dosierstab zurückführen

Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe **einmal** zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen**. Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift. **Bitte beachten:** es darf **nur diese kleine, definierte Stuhlmenge** am Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere gelangen.

4. Stuhlprobenröhrchen zudrehen

Dann drehen Sie den Dosierstab so zu, dass der Klickverschluss hörbar einrastet.

Bitte beachten: Die **Stuhllösung** im Stuhlprobenröhrcheninneren **verfärbt sich nahezu gar nicht**. Wenn Sie allerdings mehr als einmal den Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere einbringen, verfärbt sich bedingt durch zu viel Stuhl die Stuhllösung braun, was dazu führt, dass **Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann bzw. Sie ein falsch positives Ergebnis erhalten werden!**

5. Verpacken

Bitte verpacken Sie das Stuhlprobenröhrchen ins Transportumröhrchen (weiß).

6. Versand

Bitte das Transportumröhrchen und den ausgefüllten Anforderungsbogen in den beiliegenden Umschlag verpacken und bevorzugt in einer Postfiliale abgeben. **(Bitte nicht am Freitag oder Samstag abschicken!!!)**

