


## Triptofano e istamina nelle feci (A410, A651, A670)



### Istruzioni

#### Il kit è composto da:

- 1 x modulo di richiesta
- 1 x foglio di istruzioni
- 1 x kit speciale per raccolta feci
- 1 x raccogliatore per feci
- 1 x provetta per il trasporto
- 1 x busta per la spedizione

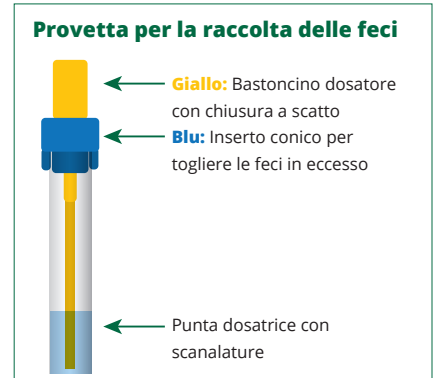

### Utilizzo della provetta per la raccolta delle feci

#### 1. Estrarre il bastoncino dosatore

Mantenere ferma la provetta per la raccolta delle feci all'inserto conico blu (l'inserto conico blu resta avvitato sulla provetta). In seguito svitare il bastoncino dosatore giallo ed estrarlo. **Non versare il liquido contenuto nella provetta per la raccolta!**

#### 2. Raccolta dei campioni di feci

Immergere il bastoncino dosatore **3 volte** in diversi punti del campione fecale. Le spirali sulla punta del dosatore devono riempirsi di campioni fecali.

#### 3. Riporre il bastoncino dosatore

Riporre **solamente una volta** il bastoncino dosatore con i campioni fecali nella provetta per la raccolta e **non estrarlo di nuovo**. Le feci in eccesso saranno tolte dalla stretta apertura dell'inserto conico blu.

**Attenzione: solamente questo piccolo quantitativo definito di feci** presente sul bastoncino dosatore deve essere inserito nella provetta di raccolta.

#### 4. Chiusura della provetta

Avvitare il bastoncino dosatore così che si chiuda con uno scatto udibile.

**Attenzione: la soluzione di feci nell'interno della provetta non vira quasi per nulla.** Tuttavia se il bastoncino dosatore è stato riposto nella provetta per più volte, la soluzione diventa di color marrone a causa delle feci in eccesso. **Il campione non è più analizzabile e/o è possibile ottenere un risultato falso positivo!**

