

## Haarmineralanalyse (E190)



### Testanleitung

#### Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen
- 1 x Testanleitung
- 1 x Papierkuvert für die Haarprobe



Bild 1



Bild 2

#### WICHTIGER HINWEIS!

**Bitte nur 1 Probenmaterial verwenden** (bei Vermischung mehrerer Probenmaterialien ist eine Untersuchung nicht möglich!)

#### Anleitung zur Probengewinnung:

##### Kopfhaare

- Die Haare werden vom Nacken / Hinterkopf entnommen.
- Schneiden Sie die Haare an mehreren Stellen möglichst nahe der Kopfhaut mit einer sauberen Schere ab (Bild 1).
- Bei einer Haarlänge von mehr als 4 cm, kürzen Sie bitte die entnommenen Haare ab Haaransatz (Bild 2).
- Haarbedarf: Mindestens 1 Esslöffel (bei krausem Haar) oder eine bleistiftdicke Menge.

##### Scham- / Körperhaare, (Achselhaare sind nicht geeignet)

- Haarbedarf: Mindestens 1 Esslöffel.

##### Fingernägel

- Nagelproben von allen 10 Fingernägeln (unlackiert).
- Für genügend Material (mind. 100 mg) können die Nägel ca. 1 bis 2 Monate gesammelt werden.

Legen Sie das Probenmaterial ins Probenkuvert und verschliessen es.

Ergänzen Sie bitte die fehlenden Angaben auf dem Kuvert.

#### Proben-Versand:

Bitte senden Sie uns im beigelegten Versandbeutel folgende Materialien zurück:

- **Ausgefüllter Anforderungsbogen, von Ihnen unterschrieben**
- **Probenkuvert**