

## Pee-Spot (A560)

**ATTENZIONE:**  
Il test non è adatto ai  
diabetici




### Istruzioni per il test

**Il kit per il test è composto dai seguenti materiali:**

- 1 x modulo di richiesta
- 1 x foglio di istruzioni
- 1 x provetta per urina (Pee Spot)
- 1 x contenitore per urina, 2 litri
- 1 x contenitore con glucosio
- 1 x provetta con liquido di stabilizzazione
- 1 x provetta per il trasporto
- 1 x busta per la spedizione/busta pre-affrancata

### Istruzioni:

Il test deve essere eseguito il mattino a digiuno. Sciogliere il glucosio nel contenitore con 200 ml di acqua tiepida e bere la soluzione il mattino a stomaco vuoto. Versare il liquido di stabilizzazione nel contenitore per urina e raccogliere l'urina per 4-5 ore. Durante questo periodo non consumare cibi contenenti glucosio (p. es. pane, patate, riso, pasta, dolci) e bevande. Dopo tre ore è possibile assumere un pasto leggero senza zuccheri (p. es. pesce, carne, verdure crude, ortaggi). Quando la quantità di urina è sufficiente, aprire il tappo a vite a tenuta stagna (1) della provetta Pee-Spot (2) e tenendo l'impugnatura (3) estrarre il Pee-Spot; conservare la provetta e il tappo.

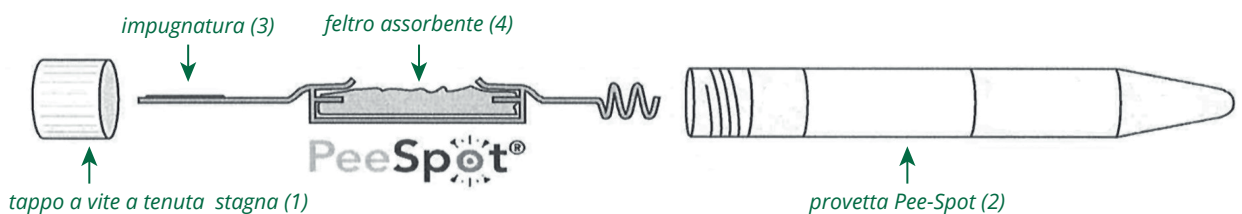

Mantenere in modo stabile il Pee-Spot mediante l'impugnatura (3) e immergere il feltro assorbente (4) nel contenitore per l'urina. In seguito inserire il supporto con il feltro imbevuto nella provetta Pee-Spot e chiudere saldamente con il tappo a vite.

**Si prega assolutamente di scrivere sulla provetta Pee-Spot:**

- **Nome e cognome**
- **Data**
- **Materiale**

Inserire le provette per urina nelle provette bianche destinate al trasporto (contenitore di protezione per la spedizione); inserire infine queste ultime insieme al modulo di richiesta nella busta per la spedizione.