

Metabolic Screen (M200, M110)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

1 x Anforderungsbogen

1 x Testanleitung

2 x Serum + Transportmörhrchen (Wichtiger Hinweis: 1x Serum für Prosinsulin: **Serum zentrifugiert, gefroren, EXP**)

1 x EDTA-Rörhrchen

1 x NaF-Rörhrchen

1 x HCY-Rörhrchen

2 x Stuhlrörhrchen + Stuhlfänger

Um eine hohe diagnostische Sicherheit der Stuhluntersuchung zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Probenentnahme:

1. Bitte verwenden Sie zur Stuhlgewinnung den **beiliegenden Stuhlfänger**. Der Stuhl sollte nicht mit dem Toilettenbecken oder Wasser in Berührung kommen.
2. Bitte schrauben Sie das **Stuhlrörhrchen (brauner Deckel)** auf und entnehmen Sie mit dem Löffel an mehreren Stellen Stuhlproben. Bitte befüllen Sie das Stuhlrörhrchen **bis zur Markierung**.
3. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das **Stuhlrörhrchen**. Bitte beschriften Sie das **Etikett** mit dem Namen, Geburtsdatum und dem Abnahmedatum und stecken es in das beiliegende **Transportmörhrchen (weiß)**.
4. Bitte packen Sie das Transportmörhrchen und den ausgefüllten unterschriebenen **Anforderungsbogen** in die beiliegende **Postversandtasche** und kleben diese zu.
5. Bitte geben Sie die Postversandtasche bevorzugt in einer Postfiliale ab
(Wichtiger Hinweis: **Bitte nicht am Freitag (Wochenende) oder vor Feiertagen versenden!!!**)