


ColoAlert - Test zur Darmkrebsfrüherkennung im Stuhl (H205)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen
- 1 x Testanleitung
- 1 x Stuhlfänger
- 1 x Stuhlröhrchen für Genanalyse
- 1 x Stuhlröhrchen für Okkultbluttest
- 1 x Transportumröhrchen

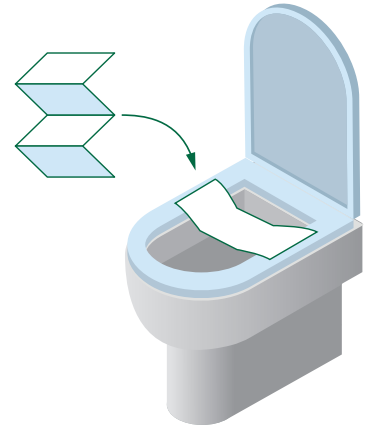

Um eine hohe diagnostische Sicherheit der Stuhluntersuchung zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Probenentnahme:

1. Stuhlprobengewinnung für Genanalyse




- Bitte verwenden Sie zur Stuhlgewinnung den **beiliegenden Stuhlfänger**. Der Stuhl sollte nicht mit dem Toilettenbecken oder Wasser in Berührung kommen.
- Bitte schrauben Sie das **Stuhlröhrchen** mit der **enthaltenen Flüssigkeit** auf – **Achtung: bitte die Flüssigkeit nicht ausschütten!** Entnehmen Sie mit dem Löffel an drei verschiedenen Stellen - in der Mitte der Stuhlprobe – **bitte insgesamt maximal eine erbsengroße Menge Stuhl**. **ACHTUNG: Die Probengröße sollte NICHT die Größe des Löffels überschreiten!**
- Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das **Stuhlröhrchen**. Schütteln Sie das Stuhlröhrchen für mindestens eine Minute, bis eine **gleichmäßige Mischung** entstanden ist.
- Bitte beschriften Sie das **Etikett** mit dem **Namen, Geburtsdatum** und dem **Abnahmedatum** und stecken es in das beiliegende Transportumröhrchen.

2. Stuhlprobengewinnung für Okkultbluttest



- Bitte verwenden Sie zur Stuhlgewinnung den **beiliegenden Stuhlfänger**. Der Stuhl sollte nicht mit dem Toilettenbecken oder Wasser in Berührung kommen.
- Bitte schrauben Sie das **Stuhlröhrchen (brauner Deckel)** auf und entnehmen Sie mit dem Löffel an mehreren Stellen Stuhlproben. Bitte befüllen Sie das Stuhlröhrchen **bis zur Markierung**.
- Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das **Stuhlröhrchen**. Bitte beschriften Sie das **Etikett** mit dem Namen, Geburtsdatum und dem Abnahmedatum und stecken es in das beiliegende **Transportumröhrchen (weiß)**.

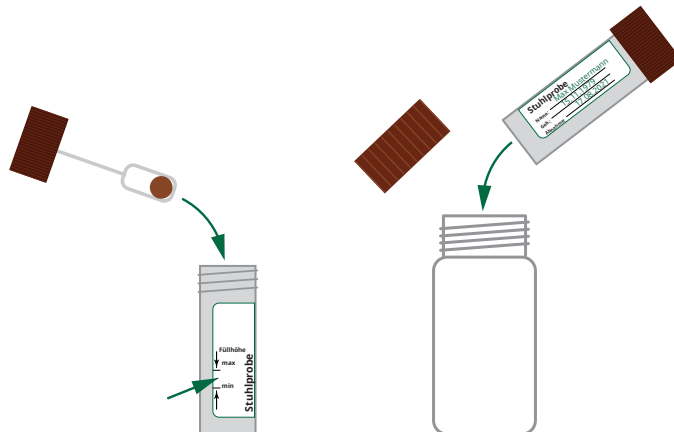

3. Versand

- Bitte das Transportumröhrchen und den ausgefüllten Anforderungsbogen in den Umschlag verpacken und bevorzugt in einer Postfiliale abgeben. **Wichtiger Hinweis: Bitte nicht am Freitag (Wochenende) oder vor Feiertagen versenden!!!**