

## Melatonine slaaprofiel (O380)



### Handleiding voor de speekseltest

Speekselmonsters graag om 22.00 uur, 24.00 uur en 02.00 uur in de nacht afnemen

#### De testset bevat de volgende materialen:

- 1 x aanvraagformulier**
- 1 x handleiding**
- 3 x speekselbuisjes**
- 1 x sealbag met vliesdoekje**
- 1 x verzendenvelop**

#### Vorbereiding van de test:

Spoel uw mond goed met water.

Het speekselmonster moet beslist vóór het tandenpoetsen of op zijn vroegst 30 minuten na het tandenpoetsen afgenomen worden.

#### Belangrijk: de speekselmonsters moeten in het donker afgenomen worden!

#### Uitvoering van de test:

- Het eerste buisje om **22.00** uur 's avonds met speeksel vullen
- Het tweede buisje om **24.00** uur middernacht vullen
- Het derde (laatste) buisje om **02:00** uur 's nachts vullen

Het speeksel moet rechtstreeks in het buisje gedaan worden.

Het buisje moet half gevuld worden (zonder het speekselschuim!).

#### Vermeld op het buisje:

- **Uw naam**
- **Datum**
- **Het tijdstip van afname**

Stop nu de beschreven en met speeksel gevulde buisjes in het vlieszakje en vervolgens in de lekvrije sealbag.

Stop dit samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig

mogelijk op de post. **De gevulde speekselbuisjes moeten tot het moment van verzending in de koelkast bewaard worden.**

*LET OP: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag!*