

Oestrogeen-metabolieten (F 325)



Gebruiksaanwijzing

De testset bevat de volgende onderdelen:

- 1 x aanvraagformulier*
- 1 x handleiding*
- 1 x urinebuisje*
- 1 x plastic pipetje*
- 1 x in te vullen etiket*
- 1 x donker verzendkokertje*
- 1 x verzendenvelop*

Handleiding:

Het urinebuisje moet met de **tweede ochtendurine** tot aan de bovenste markering gevuld worden. Volg hiervoor onderstaand advies:

- Schrijf allereerst op het etiket uw naam en de datum van opname en plak dit op het urinebuisje (met het witte dopje).
- Vang de tweede ochtendurine na het opstaan op in een plastic beker (of in een andere schone opvangbak).
- Vul nu met behulp van de plastic pipet het urinebuisje met het witte dopje tot aan de bovenste markering (let er daarbij op dat de wit/gele stabilisator in het buisje blijft).
- Vervolgens het gevulde urinebuisje onmiddellijk in het donkere verzendkokertje stoppen (zodat er geen licht meer bij kan komen)
- De opvangbeker en het plastic pipetje kunnen weggegooid worden.

Verzending van het testmateriaal:

Stop het donkere verzendkokertje (met daarin het gevulde urinebuisje) samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.

LET OP: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag!