

Equol-Bildung aus Sojaprodukten (A677)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x Urin-Monovette**
- 1 x Patientenaufkleber**
- 1 x Transportumröhrchen**

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Es sollte 48 h vor der Provokation auf isoflavonhaltige Lebensmittel und auf Alkohol verzichtet werden, da diese das Testergebnis beeinflussen können.

Testdurchführung

- Trinken Sie am Abend vor dem zu Bett gehen 200 ml Sojamilch.
- Sammeln Sie den ersten Morgenurin in einem Urinauffangbecher.
- Ziehen Sie mit Hilfe der Spitze eine Urinmonovette vollständig auf.
- Die Spitze entfernen und die Monovette verschließen.
- Becher und Spitze werfen.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Material = Urin ankreuzen**

Bitte geben Sie das beschriftete Urinröhrchen in das weiße Transportröhrchen (Schutzgefäß für den Postversand) und dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.