

## Produzione di equolo da prodotti a base di soia (A677)



### Istruzioni per il test

#### **Il kit per il test è composto dai seguenti materiali:**

- 1 x modulo di richiesta*
- 1 x foglio di istruzioni*
- 1 x Monovette per urina*
- 1 x adeviso personalizzato paziente*
- 1 x provetta per il trasporto*
- 1 x busta per la spedizione/ busta pre-affrancata*

#### **Quali condizioni devono essere soddisfatte?**

Nelle 48 ore prima della provocazione non consumare alimenti contenenti isoflavoni e non bere alcol, poiché potrebbero influire sul risultato del test.

#### **Istruzioni**

- La sera prima di andare a letto bere 200 ml di latte di soia.
- Raccogliere la prima urina del mattino in un contenitore apposito.
- Con il puntale di raccolta riempire completamente una Monovette Urine.
- Asportare il puntale e chiudere la Monovette.
- Eliminare contenitore e puntale.

#### **Si prega assolutamente di scrivere sulla provetta:**

- **Nome e Cognome**
- **Data**
- **Materiale = segnare con una crocetta urina**

Inserire la provetta per urina nella provetta destinata al trasporto (contenitore di protezione per la spedizione); inserire infine quest'ultima insieme al modulo di richiesta nella busta per la spedizione.