

## Multiementanalyse im Speichel

Amalgam- / Wurzelfüllungen (I610) Kronen (I620)  
Prothesen und Implantate (I630) Bisphenol A (I640)



### Testanleitung

#### Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x Speichelröhrchen**
- 1 x Kaugummi**
- 1 x Patientenaufkleber**
- 1 x Transportröhrchen**

#### Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Bitte Test morgens vor dem Frühstück nüchtern durchführen. Vor der Testdurchführung bitte nicht rauchen und keine Zähne putzen. Wasser trinken ist erlaubt.

#### Anleitung:

- Kaugummi aus dem Transportröhrchen entnehmen.
- **Speichelröhrchen zur Hälfte mit nativem Speichel füllen.**
- Dann 5 - 10 Minuten beigelegten Kaugummi wenn möglich direkt auf den (Amalgam-) Füllungen intensiv kauen.
- Direkt danach weiteren Speichel im **gleichen Speichelröhrchen** sammeln.

#### Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**

Bitte geben Sie das beschriftete Speichelröhrchen in das größere Transportröhrchen (Schutzgefäß für den Postversand) und dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.