

Analisi multi-elemento nella saliva

Amalgama dentale/Otturazioni della radici (I610) Corone dentali (I620)
Protesi e impinati dentali (I630) Bisfenolo A (I640)



Istruzioni per il test

Il kit per il test è composto dai seguenti materiali:

- 1 x modulo di richiesta*
- 1 x foglio di istruzioni*
- 1 x provetta per campione di saliva*
- 1 x chewing gum*
- 1 x etichetta dati paziente*
- 1 x provetta per il trasporto*
- 1 x busta per la spedizione/busta pre-affrancata*

Quali condizioni devono essere rispettate?

Si prega di eseguire il test la mattina a digiuno prima della colazione. Prima del test non fumare e non lavarsi i denti. È comunque possibile bere acqua.

Istruzioni:

- Prelevare il chewing gum dalla provetta per il trasporto.
- **Riempire per metà la provetta per saliva con saliva nativa.**
- In seguito masticare in modo energico per 5-10 minuti il chewing gum, se possibile direttamente sull'amalgama/otturazione.
- Subito dopo raccogliere la saliva nella **medesima provetta per saliva.**

Si prega di indicare assolutamente sulla provetta:

- **Nome e cognome**
- **Data**

Inserire la provetta per saliva etichettata nella provetta-contenitore destinata al trasporto (contenitore di protezione per la spedizione); inserire infine quest'ultima insieme al modulo di richiesta nella busta per la spedizione.