

Kryptopyrrol

(L 120)



Handleiding

De testset bevat de volgende materialen:

1 x aanvraagformulier

1 x handleiding

1 x donkere verzendkoker

1 x urinebuisje (monovette) met tekstveld en gele opzuignaald

1 x enveloppe

Gebruiksaanwijzing:

Het urinebuisje moet gevuld worden met de eerste ochtendurine. Voor een nauwkeurig resultaat is het belangrijk dat u de volledige ochtendurine gebruikt, d.w.z. dat de blaas niet in de laatste zes uur van tevoren mag zijn gelegegd.

- Verzamel de eerste ochtendurine na het opstaan in een schone opvangbeker (of in een geschikte, schone container).
- Vul nu het urinebuisje (schroef het kleine dopje eraf, doe de gele plastic punt erop, trek aan de zuiger totdat de buis helemaal gevuld is en breek dan de zuiger af op het breekpunt, verwijder de plastic punt en schroef het dopje er weer op).
- Plak het bijgevoegde etiket voorzien van uw naam en datum op het urinebuisje.
- Doe nu de gevulde urinebuis in de donkere verzendkoker en doe deze koker samen met het ingevulde aanvraagformulier in de blauwe envelop.
- Het plastic bekertje en de pipet kunnen worden weggegooid.

Het urine monster graag voorzien van uw:

- **Naam**
- **Datum**
- **Materiaal = Urine aankruisen**



Let op: Graag uitsluitend insturen op maandag, dinsdag en woensdag.

Niet op vrijdag of voor feestdagen insturen.