


Handleiding Speekselhormonen T905

Beste patiënt,

Om te waarborgen dat het speeksel diagnostisch betrouwbaar kan worden onderzocht, is het noodzakelijk dat de stappen voor de monsterafname nauwkeurig worden gevolgd!

Inhoud van de speeksel-testset:

- 1 x aanvraagformulier
- 1 x handleiding
- 2 x speekselbuisjes
- 1 x lekvrije sealbag met vliesdoekje
- 1 x verzendenvolop

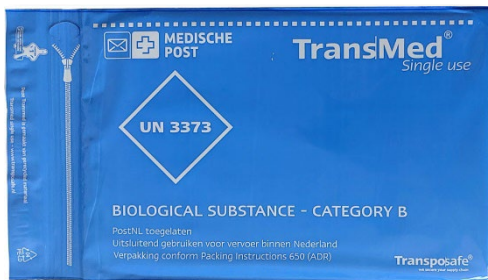

Belangrijke aanwijzingen die in acht moeten worden genomen voordat de test wordt uitgevoerd:

Vermijd seksueel contact vanaf 24 uur voor de test.

Eet de dag vóór de monsterafname geen vlees, zuivelproducten, soja, komkommers en peulvruchten. Ook alcohol, chocolade of nicotine mogen niet worden geconsumeerd.

Vrouwen: In de loop van de maandelijkse cyclus schommelt normaliter de progesteronspiegel. Er is minder progesteron detecteerbaar in de eerste helft van de cyclus, terwijl de progesteronspiegel sterk stijgt in de tweede helft. Daarom is belangrijk wanneer het speekselmonster wordt genomen.

Het ideale tijdstip voor vrouwen die hun cyclus nog hebben, is op de 22e dag van de cyclus (+/- 2 dagen). In elk geval moet de test in de tweede helft van de cyclus worden uitgevoerd.

Wanneer vrouwen geen cyclus meer hebben, maakt het niet uit op welke dag de test wordt uitgevoerd.

Mannen kunnen de test elke ochtend op de nuchtere maag uitvoeren.

Hormoonhoudende geneesmiddelen - Vermeld op het anamneseformulier als de pil, synthetische hormonen en hormonen, zoals die in hormoonspiralen, hormoonpleisters, prikpil, enz. wordt gebruikt, aangezien bij de therapie daarmee rekening moet worden gehouden.

De test moet 's ochtends op de nuchtere maag worden uitgevoerd.

Monsterafname:

- Spoel de mond vóór de test meerdere keren grondig met veel vers water. Wacht daarna 5 minuten.
- Bloedend tandvlees kan de uitslag vervalsen. Mocht blijken dat het speeksel in het testbuisje ietwat roze van kleur is, spoel het busje dan af, wacht even en herhaal de procedure.
- Verzamel een voldoende hoeveelheid speeksel in de mondholte en vul de bus met de rode schroefdop (*ochtendbus*) rechtstreeks daarmee. Herhaal dit zo vaak tot het busje minimaal voor de helft is gevuld (*op de schaal ca. 3 ml*). Sluit het busje vervolgens goed.

Schrijf het tijdstip waarop het monster is genomen, op het busje.

De minimale hoeveelheid speeksel is beslist noodzakelijk om alle vereiste onderzoeken te kunnen uitvoeren!

- Vul de tweede bus met de witte schroefdop 30 minuten later op dezelfde manier.

Schrijf ook op dit busje het tijdstip waarop het monster is genomen.

- De speekselmonsters moeten tot verzending in de koelkast worden bewaard.
- Stop de speekselbuisjes in het lekvrije sealbag, leg dit samen met het ondertekende aanvraagformulier in de bijgevoegde verzendenvolop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.

Belangrijk: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag. Niet versturen vóór het weekend en vóór feestdagen!

Verklaring van de patiënt:

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens (oa. voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, gegevens omtrent mijn lengte en gewicht, anamnese en medicijngebruik) aan het laboratorium worden verstrekt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het aangevraagde onderzoek (art. 6 lid 1 sub b AVG / EU 2016/679).

Ik heb het recht om zonder opgave van redenen op elk gewenst moment mijn toestemming in te trekken. Ik verklaar op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de kosten van de onderzoeken. Tevens wordt conform art. 10GÖA (3) een bedrag van 5,60 euro aan verwerkingskosten in rekening gebracht.

X

Plaats, datum

X

Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger)