

Tryptofaan en histamine in feces

(A410, A651, A670)



Handleiding

De testset bevat de volgende onderdelen:

- 1 x aanvraagformulier
- 1 x handleiding
- 1 x buisje voor de feces met geel dopje
- 1 x fecesvanger
- 1 x vliesdoekje
- 1 x sealbag
- 1 x verzendenvelop



Handleiding voor fecesafname

1. Het doseerstaafje eruit trekken

Houd het fecesbuisje vast bij de blauwe ring (**de blauwe ring zit vast aan het buisje. Blauwe ring niet draaien of openen**).

Draai aan het **gele doseerstaafje** en trek het staafje uit het buisje. **Zorg ervoor dat de vloeistof in het buisje blijft!**

2. Fecesmonster afnemen

Prik het gele staafje op **drie verschillende plaatsen** in de ontlasting. De groefjes aan de punt van het staafje moeten zich met ontlasting vullen.

3. Het doseerstaafje terugplaatsen

Het gevulde staafje in **één keer** in het fecesbuisje terugplaatsen en er **niet meer uithalen**. Een te veel aan ontlasting wordt op deze manier langs de blauwe ring afgestreken. **Let op:** er hoeft **alleen deze kleine, aan het doseerstaafje zittende** beperkte hoeveelheid ontlasting in het fecesbuisje terecht te komen.

4. Het buisje dichtdraaien

Het staafje nu duidelijk hoorbaar in het buisje vastdraaien. **Let op:** De suspensie in het buisje verkleurt praktisch niet. Wanneer u echter met het doseerstaafje het buisje meerdere malen vult, verkleurt de suspensie bruin, wat betekent dat **uw verzoek niet in behandeling kan worden genomen, dan wel u een vertekende uitslag krijgt!**

5. Verpakken

Stop het gevulde fecesbuisje in het vliesdoekje en stop alles in de sealbag en plak het dicht.

6. Verzenden

Stop de sealbag met het aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop nog dezelfde dag op de post.

Belangrijk: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag. Niet versturen vóór het weekend en voor feestdagen!

