

## Testset voor occultbloed in feces Hemoglobine en haptoglobine (A210, A310, A320)



### Handleiding

#### De testset bevat de volgende onderdelen:

- 1 x Aanvraagformulier
- 1 x Handleiding
- 1 x Speciaal fecesbuisje met wit etiket
- 1 x Fecesvanger
- 1 x Verzendenvelop met sealbag en vliesdoekje



### Gebruik van het fecesbuisje

#### 1. Doseerstaafje eruit trekken

Het fecesbuisje vasthouden bij het **blauwe stuk (deze blijft vastzitten op het fecesbuisje)**. Dan het **gele doseerstaafje** opendraaien en eruit trekken. **De vloeistof niet uit het buisje gieten!**

#### 2. Fecesmonster afnemen

Met het doseerstaafje **3 keer** op verschillende plekken in de feces prikken. De inkepingen van het staafje moeten hierbij met feces worden gevuld.

#### 3. Doseerstaafje terugplaatsen

Het gevulde staafje in **één keer** in het fecesbuisje terugplaatsen en er **niet meer** uithalen. Een te veel aan feces wordt op deze manier langs de blauwe ring afgestreeken.

**Let op:** er hoeft alleen deze kleine, aan het doseerstaafje zittende beperkte hoeveelheid ontlasting in het fecesbuisje terecht te komen.

#### 4. Het buisje dichtdraaien

Hierna draait u met het doseerstaafje de afnamebuis met een hoorbare klik dicht.

**Let op:** De **suspensie** in het buisje **verandert nauwelijks van kleur**. Als u het doseerstaafje echter meer dan eens in het fecesbuisje steekt, wordt de suspensie bruin door te veel ontlasting. **Dit betekent dat uw monster niet meer kan worden gemeten of dat u een vals-positief resultaat krijgt!**

#### 5. Verpakken

Stop het gevulde fecesbuisje in het vliesdoekje en stop alles in de sealbag en plak het dicht.

#### 6. Verzenden

Stop de sealbag met het aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop nog dezelfde dag op de post.

**Belangrijk: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag. Niet versturen vóór het weekend en voor feestdagen!**

