

## Vaginale Florastatus (Aromatogram)



### Handleiding

De testset bevat de volgende onderdelen:

1 x aanvraagformulier

1 x handleiding


1 x pH-meter

2 x gesealde swabs met koker

1 x BD Affirm: ampul, koker + swab

1 x verzendenvelop

### Instructies BD Affirm:

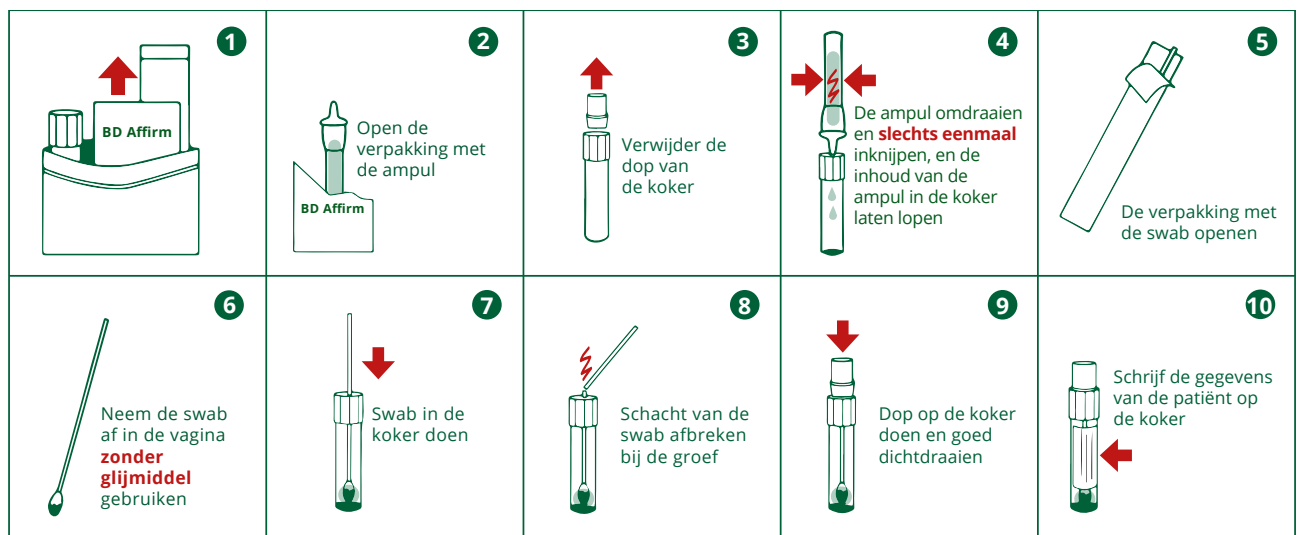

**Let op: test niet afnemen tijdens de menstruatie en niet na geslachtsverkeer!**

**Voor de drie swabs geldt:** gedurende ca. 10 sec. bevochtigen met de vaginale afscheiding door de swab al draaiend langs de vaginawand te strijken. (Let op: de swabs niet met de vingers aanraken, of in contact met de omgeving brengen!!). Stop de swabs in de kokers en sluit ze goed af. Na de monster afname de pH van de vagina bepalen m.b.v. de pH-meter en deze op het aanvraagformulier schrijven.

**Vermeld alstublieft altijd op het etiket van de testbuisjes:**

- Naam
- Datum

**Het monster hoeft niet te worden gekoeld, maar kan gewoon op kamertemperatuur worden bewaard.**

Doe de drie gevulde testbuisjes met beschreven etiket samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe deze zo snel mogelijk op de post.