

Gliadorfine en casomorfine (C710)



Handleiding

De testset bevat de volgende onderdelen:

1 x aanvraagformulier

1 x handleiding

1 x plastic pipetje

1 x urinebuisje met stabilisator

1 x donkere verzendkoker

1 x in te vullen etiket voor het urinebuisje

Handleiding:

Het urinebuisje moet met de **eerste ochtendurine** gevuld worden (tot de markering).

- Vang de eerste ochtendurine direct na het opstaan op in een schone plastic beker (of andere schone opvangbak).
- Tik het urinebuisje (met het witte dopje) meerdere malen met de bodem op een vaste ondergrond zodat het (niet giftige) stabilisatorpoeder op de bodem van het buisje valt.
- Vul nu met behulp van de plastic pipet het urinebuisje met het witte dopje tot aan de markering – ca. 5 mm onder de rand. Let er daarbij op dat de stabilisator in het urinebuisje blijft.
- Plaats vervolgens het gevulde urinebuisje onmiddellijk in de donkere verzendkoker zodat er geen licht meer bij kan komen.
- De opvangbeker en het plastic pipetje kunnen weggegooid worden.

Vergeet niet het urinebuisje te voorzien van:

- **Naam**
- **Datum**
- **Bij materiaal = Urine aankruisen**

Stop de donkere verzendkoker samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post, bij voorkeur afgeven op het postkantoor.



Let op: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag, of woensdag!

Niet versturen voor het weekend of voor feestdagen!