

Haarmineraalanalyse (E190)



Handleiding

De testset bevat de volgende onderdelen:

1 x aanvraagformulier

1 x handleiding

1 x envelop voor het testmateriaal (haar en nagels)

1 x verzendenvelop



Foto 1



Foto 2



Belangrijk: Alleen **1 onderzoeksmateriaal** insturen (hoofdhaar **OF** vingernagels **OF** schaamhaar).
Als verschillende onderzoeksmaterialen worden gemengd, is een analyse niet mogelijk!

Het afnemen van testmateriaal:

Hoofdhaar

- Er moet haar gebruikt worden uit de nek of van het achterhoofd.
- Knip met een schone schaar op meerdere plekken en zo dicht mogelijk bij de hoofdhuid stukjes haar weg (zie Foto 1)
- Kort bij lange haren de stukjes haar in tot 4 cm vanaf de hoofdhuid (zie Foto 2).
- Benodigde hoeveelheid: minimaal 1 eetlepel (bij krullend haar) of een potlooddikke streng.

Schaamhaar/Lichaamsbeharing (okselhaar is niet geschikt)

- Benodigde hoeveelheid: minimaal 1 eetlepel.

Vingernagels

- Nodig: stukjes van alle 10 vingernagels (ongelakt).
- Voldoende materiaal (minstens 100 mg) kan gedurende 1 tot 2 maanden worden verzameld

Stop het verzamelde testmateriaal in de envelop en plak deze dicht.

Vul de ontbrekende gegevens in op de envelop.

Verzending van het testmateriaal:

Stop de met het testmateriaal gevulde envelop samen met het ingevulde aanvraagformulier en het ondertekende laboratoriumformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.



Let op: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag, of woensdag!

Niet versturen voor het weekend of voor feestdagen!