


ColoAlert - Test voor de vroegtijdige opsporing van darmkanker in feces (H205)



Handleiding

De testset bevat de volgende onderdelen:


- 1 x aanvraagformulier
- 1 x handleiding
- 1 x fecesvanger
- 1 x testbuisje voor de gen-analyse
- 2 x testbuisjes voor de occult bloed analyse
- 1 x lekvrije sealbag met vliesdoekje

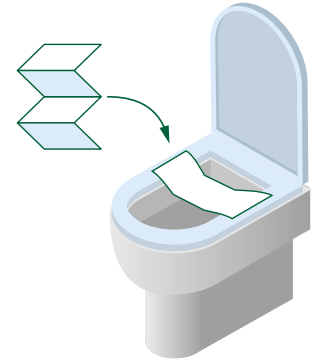

Voor het waarborgen van een hoogwaardige diagnostische analyse vragen wij u de volgende punten nauwgezet te volgen bij het afnemen van de test:


- Gebruikt u alstublieft de meegeleverde fecesvanger om beide buisjes te vullen. De ontlasting mag absoluut niet met water of de toiletpot in aanraking komen.

1. Fecesafname voor de gen-analyse

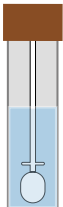


- Draai het langere, smallere **testbuisje, dat een stabiliserende vloeistof bevat**, open. Neem met het lepeltje wat feces, op drie verschillende plaatsen uit het midden van de ontlasting. Alles bij elkaar **maximaal ter grootte van een erwt**.

- **Let op:** de vloeistof niet uit het buisje gieten! De meest gemaakte fout is het overmatig vullen van het buisje. Het afgenomen monster moet maximaal zo groot zijn als een erwt en mag NIET groter zijn dan de lepel! Teveel vullen leidt tot afkeuring van de analyse en vereist een nieuw monster.

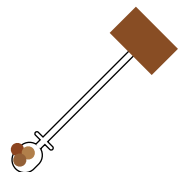

- Schroef de dop met de lepel weer op het buisje. **Zwenk het ontlastingsbuisje** gedurende tenminste 1 minuut goed heen en weer, totdat de ontlasting gelijkmatig met de vloeistof vermengd is.

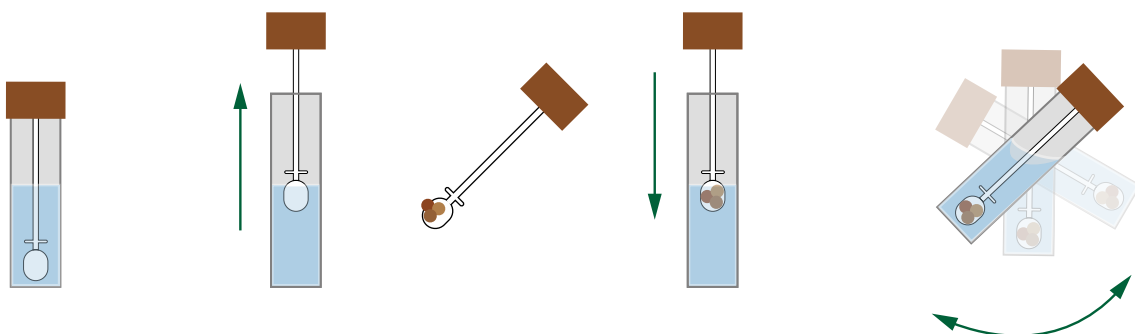

2. Afname voor analyse van occult bloed

1. Doseerstaafje eruit trekken

Het fecesbuisje vasthouden bij het **blauwe stuk (deze blijft vastzitten op het fecesbuisje)**. Dan het **gele doseerstaafje** opendraaien en eruit trekken. **De vloeistof niet uit het buisje gieten!**

2. Fecesmonster afnemen

Met het doseerstaafje **3 keer** op verschillende plekken in de feces prikken. De inkepingen van het staafje moeten hierbij met feces worden gevuld.

3. Dosierstaafje terugplaatsen


Het gevulde staafje in **één keer** in het fecesbuisje terugplaatsen en er **niet meer** uithalen. Een te veel aan feces wordt op deze manier langs de blauwe ring afgestreken.

Let op: er hoeft alleen deze kleine, aan het doseerstaafje zittende beperkte hoeveelheid ontlasting in het fecesbuisje terecht te komen.

4. Het buisje dichtdraaien

Hierna draait u met het doseerstaafje de afnamebuis met een hoorbare klik dicht.

Let op: De **suspensie** in het buisje **verandert nauwelijks van kleur**. Als u het doseerstaafje echter meer dan eens in het fecesbuisje steekt, wordt de suspensie bruin door te veel ontlasting. **Dit betekent dat uw monster niet meer kan worden gemeten of dat u een vals-positief resultaat krijgt!**

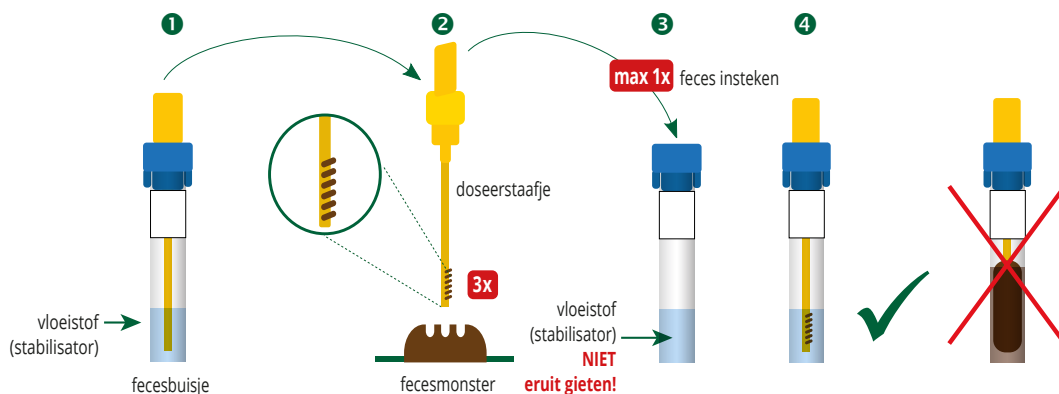

Verzending van het monster



- **Alle buisjes alstublieft voorzien van uw:**

- **Naam**
- **Geboortedatum**
- **Datum van afname**

Doel alle (geëtiketteerde) buisjes met feces in de bijgeleverde lekvrije sealbag en plak deze dicht. De fecesmonsters en het ingevulde aanvraagformulier in de bijgeleverde verzendenvolp doen en bij voorkeur afgeven bij een postfiliaal.

Belangrijk: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag. Niet versturen vóór het weekend en voor feestdagen!