

Dryspot


(N105, N120, N130, N140, N340, N610, N1000, N1010, N1100)



Handleiding


De testset bevat de volgende onderdelen:

- 1 x aanvraagformulier
- 1 x handleiding
- 1 x desinfectiedoekje
- 1 x pleister
- 2 x lancet
- 1 x pipet
- 1 x vochtabsorberend zakje
- 1 x lekvrije sealbag
- 1 x verzendenvolp
- 1 x dryspot kaartje

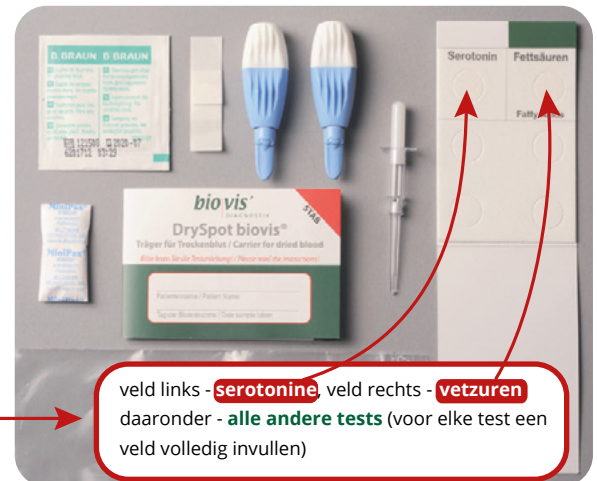

Handleiding:

1. Neem het desinfectiedoekje uit de verpakking en desinfecteer hiermee uw vingertop.
2. Pak de lancet op, zoals op het plaatje is te zien. Draai het blauwe dopje eenmaal rond en trek hem er daarna voorzichtig af.
3. Leg uw hand op een vaste ondergrond. Houd de lancet tussen uw duim en middelvinger en zet hem loodrecht op de vingertop. Druk met uw duim stevig op de witte knop. Gooi de eerste bloeddruppel weg, deze is niet geschikt omdat hij te veel weefselvocht bevat.
4. Houd uw hand op heuphoogte en masseer uw vinger tot aan het vingertopje, totdat zich een grote druppel bloed vormt.
5. Vul de pipet met de druppel bloed en wacht tot het bloed tot het witte streepje is opgezogen (=50µl bloed).
6. Druk nu op het witte gedeelte en druppel de inhoud van de gevulde pipet in het midden van het voorgestane veld en laat een en ander minstens 45-60 minuten aan de lucht drogen.
Let op: voor serotonine- en vetzuuranalyse de speciaal aangegeven velden gebruiken.
7. Schrijf uw naam op het kaartje en de datum van de bloedafname.
8. Stop het kaartje in de lekvrije sealbag en stuur hem samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvolp naar het laboratorium..

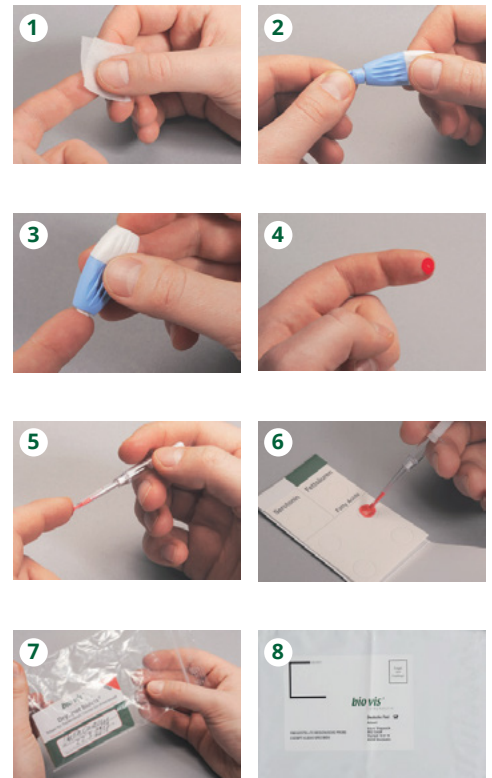

N.B.::

- Noteer de afnamedatum en het tijdstip op de voorzijde van het aanvraagformulier.
- Er kunnen alleen testen in behandeling worden genomen, die zijn voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier!