

Melatonine slaaprofiel (02.00 uur) (O360)



Handleiding

De testset bevat de volgende materialen:

- 1 x aanvraagformulier*
- 1 x handleiding*
- 1 x speekselbuisje*
- 1 x sealbag met vliesdoekje*
- 1 x verzendenvelop*

Vorbereiding van de test:

Spoel uw mond goed met water. Het speekselmonster moet beslist vóór het tandenpoetsen of op zijn vroegst 30 minuten na het tandenpoetsen afgenomen worden.



Belangrijk: de speekselmonsters moeten in het donker afgenomen worden!

Uitvoering van de test:

- Het busje om **02:00** uur 's nachts vullen

Het speeksel moet rechtstreeks in het busje gedaan worden.

Het busje moet half gevuld worden (zonder het speekselschuim!).

Vermeld op het busje:

- *Uw naam*
- *Datum*
- *Het tijdstip van afname*

Stop nu het beschreven en met speeksel gevulde busje in het vliesdoekje en vervolgens in de lekvrije sealbag. Stop dit samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.



Let op: Het gevulde speekselbusje moet tot het moment van verzending in de koelkast bewaard worden.

Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag, of woensdag!

Niet versturen voor het weekend of voor feestdagen!