

## Equol vorming uit sojaproducten (A677)



### Gebruiksaanwijzing

#### De testset bevat de volgende onderdelen:

- 1 x aanvraagformulier*
- 1 x handleiding*
- 1 x urinebuisje (monovette)*
- 1 x stickervel*
- 1 x verzendenvelop met lekvrije sealbag en vliesdoek*

#### Voorwaarden voor een correct uitgevoerde test:

Alcohol en voedingsmiddelen die isovlavonen bevatten moeten gedurende 48 uur vóór de test worden vermeden, aangezien deze het testresultaat kunnen beïnvloeden.

#### Handleiding

- Drink 's avonds voor het slapengaan 200 ml sojamelk.
- Vang de eerste ochtendurine op in een schone urine-/plastic beker.
- Pak nu de gele opzuignaald en het gele urinebuisje, schroef het gele dopje er af en bevestig de opzuignaald.
- Zuig nu urine in het urinebuisje tot die gevuld is door de stamper uit te trekken.
- Verwijder de opzuignaald en sluit het urinebuisje met het dopje. De stamper op de aangegeven plaats afbreken, zodat de rest van de stamper niet meer uitsteekt.

#### Zorg er alstublieft voor dat het urinebuisje voorzien is van:

- **Naam**
- **Datum**
- **Materiaal = Urine aankruisen**

Stop het beschreven urinebuisje in de lekvrije sealbag en stop dit samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.

Let op: Graag uitsluitend insturen op maandag, dinsdag en woensdag.

Niet op vrijdag of voor feestdagen insturen.