

Multiementanalyse im Speichel

Amalgam- / Wurzelfüllungen (I610) Kronen (I620)
Prothesen und Implantate (I630) Bisphenol A (I640)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

1 x Anforderungsbogen

1 x Testanleitung

1 x Speichelröhrchen

1 x Kaugummi

1 x Transportumröhrchen

1 x Namensetikett

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Bitte Test morgens vor dem Frühstück nüchtern durchführen. Vor der Testdurchführung bitte nicht rauchen und keine Zähne putzen. Wasser trinken ist erlaubt.

Testdurchführung

1. Kaugummi aus dem Transportumröhrchen entnehmen.
2. **Speichelröhrchen zur Hälfte mit nativem Speichel füllen.**
3. Dann 5 - 10 Minuten beigelegten Kaugummi wenn möglich direkt auf den (Amalgam-) Füllungen intensiv kauen.
4. Direkt danach weiteren Speichel im **gleichen Speichelröhrchen** sammeln.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**

Bitte geben Sie das beschriftete Speichel-Probenröhrchen in das weiße Transportröhrchen (Schutzgefäß für den Postversand) und dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.