

## Multi-elementanalyse in speeksel

Amalgaam- / wortelkanaalvullingen (I610), kronen (I620)  
prothesen en implantaten (I630), bisfenol A (I640)



### Gebruiksaanwijzing

#### De testset bevat de volgende materialen:

- 1 x aanvraagformulier*
- 1 x gebruiksaanwijzing*
- 1 x speekselbuisje*
- 1 x kauwgom*
- 1 x sticker voor patiëntgegevens*
- 1 x lekvrije sealbag met vliesdoekje*
- 1 x verzendenvelop*

#### Voorwaarden voor een correct uitgevoerde test:

Doe de test 's morgens voor het ontbijt. Voor de test mag u niet roken of uw tanden poetsen.  
Water drinken is toegestaan.

#### Handleiding:

- Haal de kauwgom uit de verpakking.
- Vul de speekselbuis tot de helft met uw speeksel.
- Kauw vervolgens gedurende 5-10 minuten intensief op de bijgevoegde kauwgom, indien mogelijk direct op de (amalgaam) vullingen.
- Onmiddellijk daarna nog meer speeksel opvangen in hetzelfde speekselbuisje.

#### Zorg er alstublieft voor dat het speekselmonster voorzien is van:

- **Naam**
- **Datum**

Stop het beschreven speekselbuisje in het lekvrije sealbag en stop dit samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en doe de envelop zo spoedig mogelijk op de post.

**Let op:** Graag uitsluitend insturen op maandag, dinsdag en woensdag.  
Niet op vrijdag of voor feestdagen insturen.