

Long-/Post-Covid **Basis-Profil** (F640)  
Long-/Post-Covid **Midi-Profil** (F642)  
Long-/Post-Covid **Komplett-Profil** (F644)



## Testanleitung

**Im Testset sind folgende Materialien enthalten:**

**1 x Anforderungsbogen COVID 7**

**1 x Testanleitung**

**1 x Testset 908**

**1 x Testset Bio1**

**1 x S**

**2 x Hep**

**2 x EDTA**

**1 x Butterfly**

**1 x Zentrifugen-Röhrchen**

**1 x Pipette**

**5 x Transportumröhrchen**

**1 x Safety-Bag**

Das Testset PCS beinhaltet alle Materialien, die Sie für die Anforderungen der drei Stoffwechselprofile (Basis, Midi und Komplettprofil) bei Long- oder Post-COVID benötigen.

Bitte beachten Sie bei den beigelegten Testsets 908 und Bio1 die jeweiligen Anleitungen!

Dieses Testset enthält Sarstedt-Monovetten. Sollten Sie in Ihrer Praxis das Vacutainer-System verwenden und Sie haben alle notwendigen Blutentnahmeröhrchen zur Hand, können Sie diese selbstverständlich auch gerne einsenden!

**Bitte alle Probengefäße jeweils unbedingt mit einem Barcodesatz sowie mit der Bezeichnung des Probenmaterials (Serum, Urin, etc.) kennzeichnen!**

Eine korrekte Zuordnung von Patient, Probe und Anforderungsbogen ist essenziell für den späteren Ablauf. Im Idealfall verwenden Sie bitte die von uns zur Verfügung gestellten Barcodetiketten, um eine eindeutige Probenidentifikation zu gewährleisten. Auf dem dazugehörigen Anforderungsbogen muss sich das entsprechende Barcode-Etikett deckungsgleich wiederfinden.



**Wichtig:** Für jeden Patienten ist ein eigener Barcodesatz zu verwenden.

Werden die Probengefäße per Hand beschriftet, sind folgende Daten unbedingt zu vermerken:

- **Namen**
- **Geburtsdatum**
- **Abnahmedatum**



**Wichtig:** Bitte unbedingt beachten: Für jeden Patienten ist jeweils eine Versandtasche zu verwenden! Bitte nicht am Freitag (Wochenende) oder vor Feiertagen versenden!!!

## Stoffwechselprofile bei Long- oder Post-COVID

### F640 Long-/Post-Covid **Basis-Profil**

Sie nutzen aus dem Testset:

- T908
- 1 x S
- 1 x Hep
- 1 x Hep-Plasma Heparin direkt zentrifugieren, das Heparin-Plasma abpipettieren und sofort lichtgeschützt verpacken.\*

1 x Hep  
zentrifugieren,  
Hep-Plasma  
abpipettieren  
und sofort  
lichtgeschützt  
verpacken!



T908 Urin  
mit Stabilisator

### F642 Long-/Post-Covid **Midi-Profil**

Sie nutzen aus dem Testset:


- T908
- 1 x S
- 1 x Hep
- 1 x Hep-Plasma lichtgeschützt (s. o.)
- 2 x EDTA



### F644 Long-/Post-Covid **Komplett-Profil**

Sie nutzen aus dem Testset:

- T908
- 1 x S
- 1 x Hep
- 1 x Hep-Plasma lichtgeschützt (s. o.)
- 2 x EDTA
- 1 x Testset Bio1

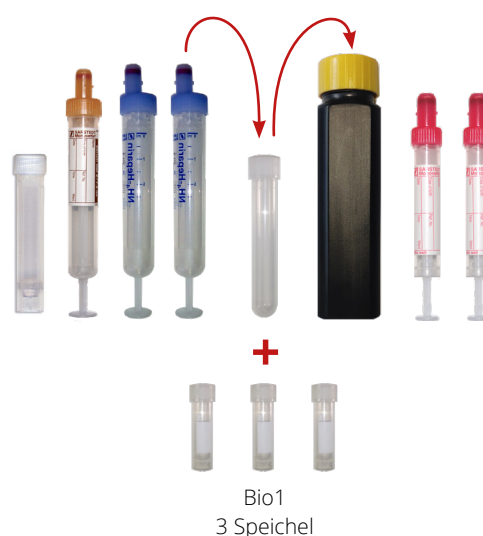

\* Sollten Sie keine Zentrifuge besitzen, Heparin sofort lichtgeschützt verpacken und schnellstmöglich versenden.