

Gewinnung von Nasen- und Rachenabstrichen (SARS-CoV-2)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x Leitfaden (Bestellung und Probenabholung)**
- 1 x Abstrichmedium (Steril)**
- 1 x Safety-Bag**

Durchführung des Rachenabstrichs

1. Öffnen Sie das Abstrichmedium oben durch ein leichtes seitliches drücken und halten den Abstrichtupfer fest.
2. Führen Sie den Abstrichtupfer in die Mundhöhle bis zum Zielgebiet ein. Der Abstrichtupfer sollte dabei nicht mit der Zunge, den Zähnen oder der vorderen Mundschleimhaut in Berührung kommen. Steichen Sie den Rachen bogenförmig ab.
3. Nach der Probenentnahme geben Sie den Abstrichtupfer zurück in das Röhrchen.
4. Beschriften Sie die Probe auf dem Etikett.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**

Bitte verpacken Sie das beschriftete Abstrichmedium zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in den Safety-Bag.

Ausführliche Anleitung bzw. Video unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=rVJrwhWWbOc> (AGES)