

# Multererger-Test (K101) und Schimmelpilzbelastungen (K611)

 K101 **Multererger-Test *NEU*** (Zytokin-Release) 3CPDA 
 K611 **Schimmelpilzbelastungen *NEU*** (Zytokin-Release) 3CPDA 

Blutentnahme und  
Probeneinsendung  
für **K101** nur  
**Montag bis Donnerstag**

Blutentnahme und  
Probeneinsendung  
für **K611** nur  
**Montag bis Mittwoch**

## Wichtige Hinweise zur Blutentnahme der Zytokin-Release-Tests:

- Innerhalb von 2 Stunden vor der Blutabnahme pro Stunde ein Glas Wasser (ca. 200 ml) trinken
- Bei Sportlern 48 Stunden vor Blutabnahme keine sportliche Tätigkeit
- Der Patient sollte mindestens 10 Minuten vor der Blutabnahme sitzen (Ruhepuls)
- Desinfektionsmittel einwirken und trocknen lassen
- Monovette/Vacutainer sollte immer komplett gefüllt sein (nicht vollständig gefüllte Monovetten/Vacutainer verwerfen)
- Monovette langsam aufziehen (Aktivierung der Thrombozyten)
- Monovette/Vacutainer sofort nach der Entnahme 3 x „über Kopf“ kippen (nicht schütteln)
- Blut bei Raumtemperatur lichtgeschützt lagern!

## Folgendes Material wird für die Zytokin-Release-Tests benötigt:



**3x** CPDA-Monovette

oder



**3x** CPDA-Vacuett



Bitte keine BD Vacutainer Glas-ACD

## Kennzeichnung der Versandtaschen der Zytokin-Release-Tests:

Aufgrund der komplexen logistischen Abläufe im Labor ist es erforderlich, die Proben deutlich sichtbar **beidseitig** auf der **äußeren** Versandtasche mit dem roten Aufkleber zu kennzeichnen. Dadurch können die Proben zeitnah erfasst und innerhalb des erforderlichen Zeitfensters in den automatisierten Aufarbeitungsprozess eingebunden werden.



Die Aufkleber für die Zytokin-Release-Tests können Sie auf unserem Materialbestellbogen anfordern.

Vielen Dank.



biovis  
Material-  
bestellbogen