

Stuhlprobengewinnung





Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

1 x Anforderungsbogen

1 x Testanleitung

2 x Stuhlröhrchen + Transportumröhrchen + Stuhlfänger

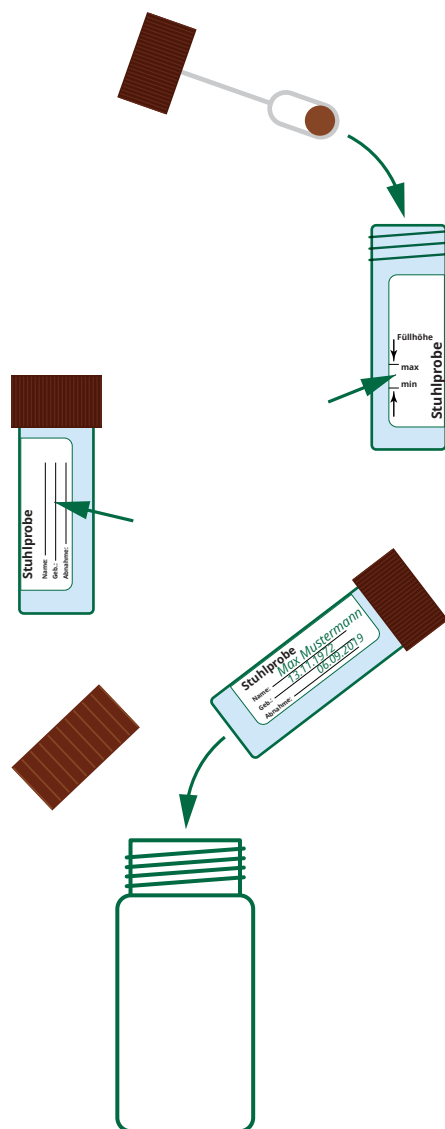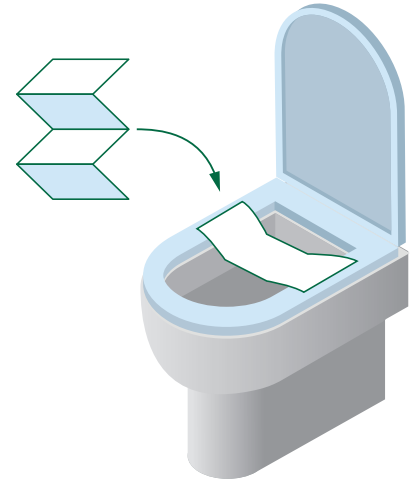

Um eine hohe diagnostische Sicherheit der Stuhluntersuchung zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Probenentnahme:

1. Bitte verwenden Sie zur Stuhlgewinnung den **beiliegenden Stuhlfänger**. Der Stuhl sollte nicht mit dem Toilettenbecken oder Wasser in Berührung kommen.
2. Bitte schrauben Sie das **Stuhlröhrchen (brauner Deckel)** auf und entnehmen Sie mit dem Löffel an mehreren Stellen Stuhlproben. Bitte befüllen Sie das Stuhlröhrchen **bis zur Markierung**.
3. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das **Stuhlröhrchen**. Bitte beschriften Sie das **Etikett** mit dem Namen, Geburtsdatum und dem Abnahmedatum und stecken es in das beiliegende **Transportumröhrchen (weiß)**.
4. Bitte packen Sie das Transportumröhrchen und den ausgefüllten unterschriebenen **Anforderungsbogen** in die **Postversandtasche** und kleben diese zu.
5. Bitte geben Sie die Postversandtasche bevorzugt in einer Postfiliale ab.

Wichtiger Hinweis: Bitte nicht am Freitag (Wochenende) oder vor Feiertagen versenden!!!