

Raccolta delle feci



Istruzioni per il test



Il kit per il test è composto dai seguenti materiali:

1 x modulo di richiesta

1 x foglio di istruzioni

2 x provette per le feci + provetta-contenitore per il trasporto + foglio speciale per la raccolta delle feci

1 x busta per la spedizione/busta pre-affrancata

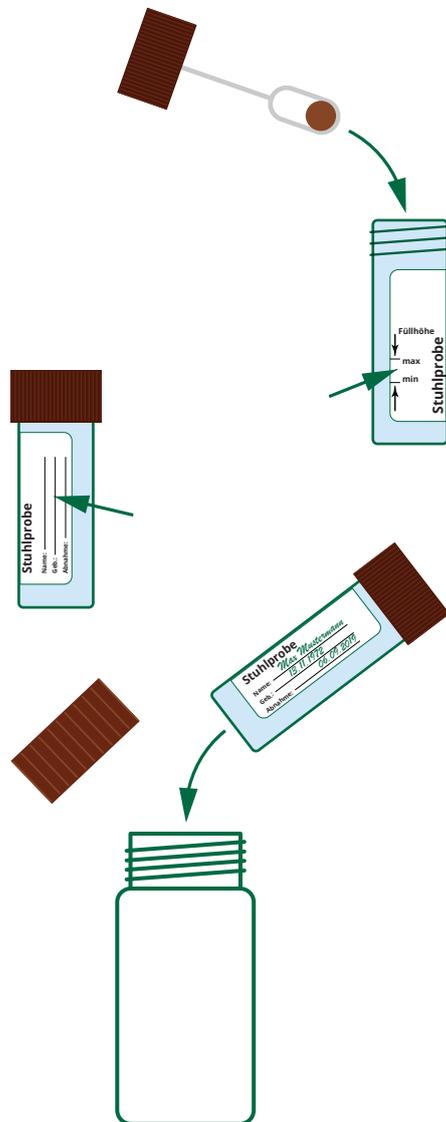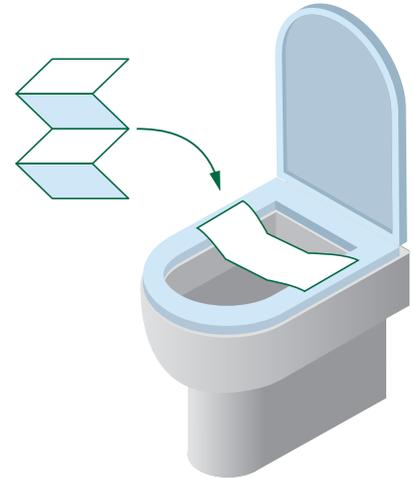

Per essere in grado di garantire un'eccellente sicurezza diagnostica dell'esame delle feci, La preghiamo di osservare i seguenti punti durante la raccolta dei campioni:

1. Per la raccolta del campione preghiamo di utilizzare il **foglio speciale** allegato. Le feci non devono entrare in contatto con il WC o con l'acqua.
2. Svitare la **provetta per la raccolta delle feci (tappo marrone)** e prelevare con la spatolina apposita campioni della defecazione in punti diversi. Riempire la provetta per la raccolta **fino al contrassegno**.
3. Riavvitare il tappo insieme alla spatolina sulla provetta. Compilare l'**etichetta** con nome, data di nascita e data della raccolta, applicarla sulla provetta e infilarla quest'ultima nella **provetta-contenitore per il trasporto (bianca)**.
4. Inserire la provetta-contenitore e il **formulario di richiesta** firmato nella **busta per la spedizione** allegata; chiudere la busta ermeticamente.
5. Consegnare la busta al proprio terapeuta.
Importante: Non spedire il venerdì (fine settimana) o prima di giorni festivi!

Spiegazione termini sull'etichetta

Stuhlprobe -> campione feci

Füllhöhe -> livello

Name -> nome

Geb. -> Data nascita

Abnahme -> Data prelievo