



## Afname fecesmonster



### Handleiding

De testset bevat de volgende onderdelen:

- 1 x aanvraagformulier
- 1 x handleiding
- 2 x fecesbuisjes
- 1 x papieren fecesvanger
- 1 x lekvrije sealbag met vliesdoek
- 1 x verzendenvelop

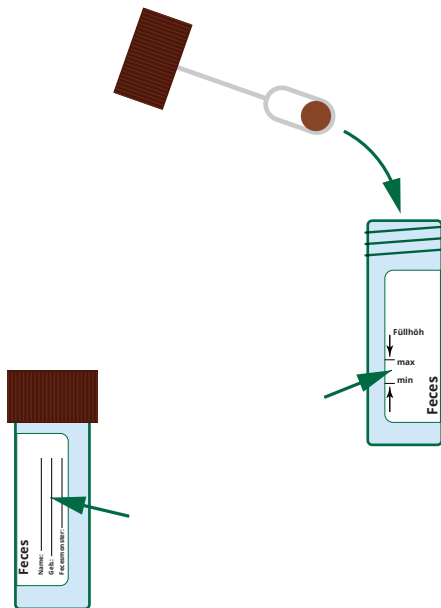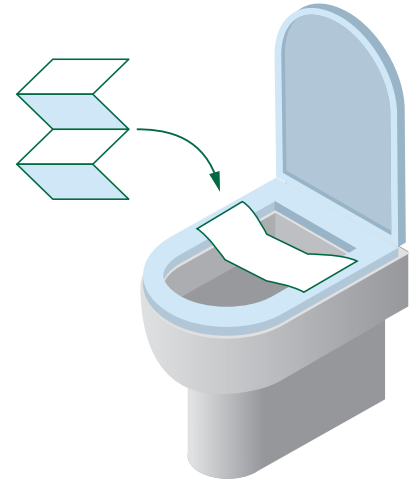

Voor nauwkeurige en sluitende laboratoriumdiagnostiek graag de volgende punten in acht nemen:

1. Gebruik de **bijgevoegde fecesvanger** voor de afname van het fecesmonster zodat de feces niet in aanraking komt met water en/of toiletpot.
2. Schroef het **buisje** (bruine deksel) open en neem met de geïntegreerde lepel op verschillende plekken feces af. Vul het busje **tot de streep**.
3. Schroef het deksel inclusief lepel weer op het fecesbuisje. Graag naam en datum feces afname op ieder busje vermelden. Wikkel de busjes in het vliesdoek en doe alle busjes in de sealbag. Plak de **sealbag** dicht door de zilveren strip te verwijderen.
4. Doe de sealbag en het ingevulde en ondertekende **aanvraagformulier** in de **verzendenvelop** en plak deze dicht.
5. Breng de envelop naar een postkantoor of brievenbus.  
**Let op: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag. Niet versturen vóór het weekend en voor feestdagen!**