

ANLEITUNG TESTSET 926

Allgemeine Stuhlprobengewinnung



SIE ERHALTEN

Das Probenröhrchen befindet sich ggf. in dem Transportröhrchen.

Testdurchführung: **5-10 Min.**



1 x Anforderungsbogen




2 x Transportröhrchen



2 x Stuhlröhrchen



2 x Stuhlfänger

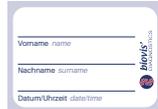

2 x Namensetikett



1 x Versandtasche

Hersteller:
biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18
65552 Limburg-Eschhofen
Tel.: +49 6431 21248 0
Fax: +49 6431 21248 66
info@biovis.de
biovis.de



**BEI WEITEREN FRAGEN,
WENDEN SIE SICH AN
DAS MEDIZINISCHE
FACHPERSONAL IHRES
VERTRAUENS.**

REF Bestellnummer: Testset 926

MD Nur zur Probennahme, wenn die Probe zur Untersuchung an biovis Diagnostik MVZ GmbH eingesendet und dort gemäß des aktuellen Leistungsverzeichnisses analysiert wird

LOT Chargennummer: Siehe Aufkleber Testset 926


L Lagertemperatur: 10-30°C

Inhouse MD Inhouse Medizinprodukt der biovis Diagnostik MVZ GmbH nach Regulation (EU) 2017/745 (MDR) und 2017/746 (IVDR)

U Verwendbar bis: Siehe Aufkleber Testset 926

ANLEITUNG TESTSET 926

1. Legen Sie alle Materialien vor sich bereit. Platzieren Sie den Stuhlfänger auf dem Toilettensitz.

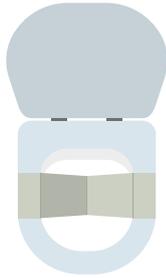

WICHTIG

Der Stuhlfänger und der Stuhl dürfen nicht mit Reinigungsmittel in Berührung kommen.

2. Die Praxis sollte die Probenröhrchen bereits mit einem Barcode für Sie beklebt haben.


Ist das nicht der Fall, beschriften Sie die Namensetiketten mit Namen und Probenentnahme-Datum und bekleben Sie die Probenröhrchen damit.




3. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das Röhrchen.




4. Entnehmen Sie an mindestens 4 Stellen Stuhlprobe und füllen Sie diese in das Stuhlröhrchen bis dieses mindestens bis zur Markierung gefüllt ist.

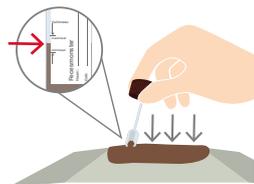

5. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das Röhrchen.

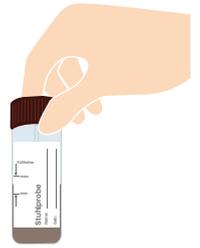


6. Lösen Sie den Stuhlfänger von der Toilettenbrille ab. Dieser ist wasserlöslich und kann mitgespült werden.

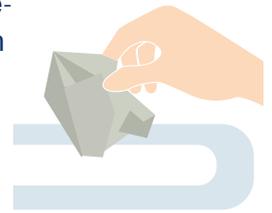


7. Füllen Sie den Anforderungsbogen gut leserlich (digital oder Druckbuchstaben) aus.

Vermerken Sie auf der Vorderseite **Namen, Geburtsdatum** und **Entnahmedatum**.

Füllen Sie auf der Rückseite die Erklärung aus und unterschreiben Sie den Anforderungsbogen.

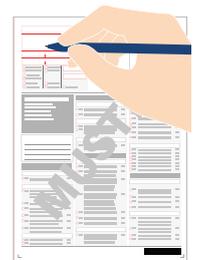



8. Packen Sie nun das beschriftete Probenröhrchen in das Transportumröhrchen und verschließen Sie es.

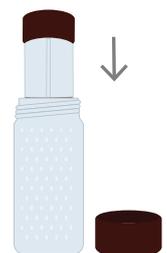

9. Packen Sie die Probenröhrchen und den ausgefüllten und unterschriebenen Anforderungsbogen zurück in die Versandtasche.

Ziehen Sie an der markierten Lasche, um den bereits verwendeten Klebestreifen zu entfernen. Benutzen Sie den innenliegenden Klebestreifen um die Versandtasche zuzukleben.


Sie können den Aufkleber mit der Testset-Bezeichnung entfernen, wenn Sie dies aus Discretionsgründen wünschen.

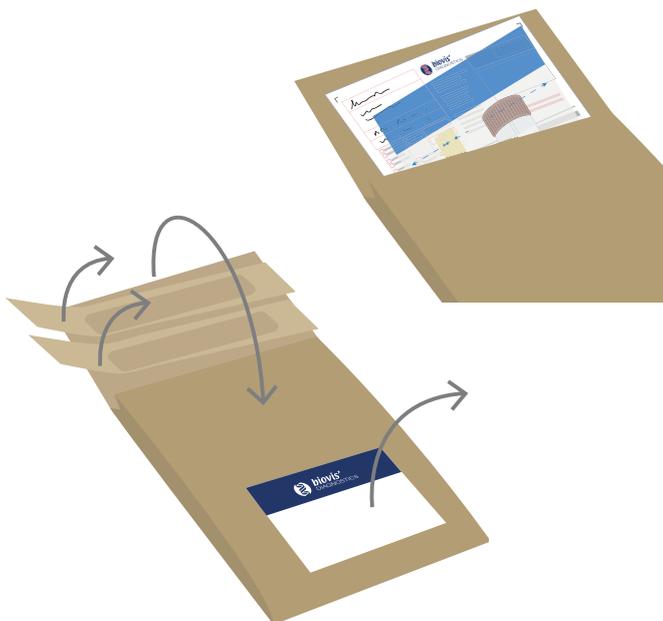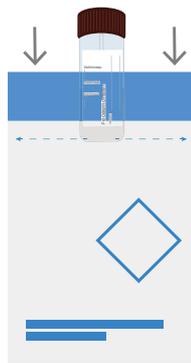

10. Geben Sie die Versandtasche schnellstmöglich in einer Postfiliale oder nach vorheriger Rücksprache bei Ihrer Praxis ab.

Bitte nicht an einem Freitag, am Wochenende oder an Feiertagen versenden und nicht in den Briefkasten werfen.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihre Praxis.

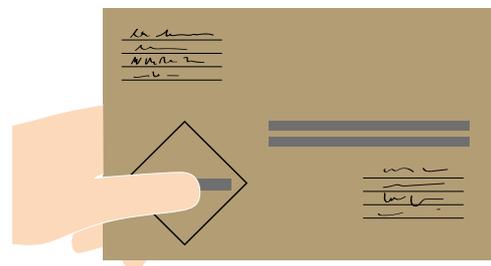

Einschränkungen und Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Hinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann zu ungünstigen Ergebnissen oder gesundheitlichen Risiken führen.
- Gewinnung einer Stuhlprobe: Das Testset ist nur zur einmaligen Gewinnung einer Stuhlprobe durch Laien vorgesehen und hat keine eigene Analyse-Funktion; eine Anwendung als Selbsttest zur Diagnose ist nicht vorgesehen.
- Stuhlprobe ins Labor schicken: Die gewonnene Stuhlprobe wird an biovis Diagnostik MVZ GmbH geschickt; die Analyseergebnisse werden dort gemäß des aktuellen Leistungsverzeichnisses durchgeführt. Die Analyseergebnisse werden durch Fachpersonal der biovis Diagnostik MVZ GmbH befundet und interpretiert.
- Nur vollständig und unversehrt verwenden: Verwenden Sie das Testset nicht, wenn Komponenten fehlen, beschädigt oder verschmutzt sind.
- Einmalverwendung: Alle Bestandteile dieses Testsets sind ausschließlich zur einmaligen Verwendung bestimmt. Eine Wiederverwendung kann zu verfälschten Ergebnissen und Gesundheitsrisiken führen.
- Handhabung biologischer Proben: Die Stuhlprobe ist potenziell infektiös. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Schleimhäuten. Waschen Sie sich nach der Probenahme gründlich die Hände mit Wasser und Seife.
- Vermeidung von Kontamination: Der Stuhlfänger sowie das Probenröhrchen dürfen nicht mit Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln oder anderen Substanzen in Berührung kommen, da dies die Messung im Labor beeinträchtigen kann.
- Lagerung vor Versand: Nach der Probenentnahme sollte das gefüllte Probenröhrchen zügig, möglichst innerhalb von 24 Stunden, an das Labor versandt werden. Bis zum Versand ist es bei Raumtemperatur (10–30 °C) aufzubewahren.
- Versandhinweise: Die Probe darf nicht an Wochenenden oder Feiertagen versendet werden. Bitte geben Sie die Versandtasche ausschließlich in einer Postfiliale oder nach Rücksprache in Ihrer Praxis ab. Ein Einwurf in einen Briefkasten ist unzulässig.
- Entsorgung: Gebrauchte Materialien wie der Stuhlfänger oder Handschuhe (falls verwendet) können über den Hausmüll entsorgt werden, sofern keine abweichenden lokalen Vorschriften bestehen. Das gefüllte Probenröhrchen darf ausschließlich an das Labor zurückgesendet werden und gehört nicht in den Hausmüll.
- Verfallsdatum: Nicht verwenden nach Ablauf des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett des Testsets angegeben.