

HANDLEIDING voor afname van fecesmonster met OmicSnap buisje **OS**



U ONTVANGT



1 x aanvraagformulier



1 x sealbag
met vliesdoek



1 x fecesbuisje



1 x handleiding



1 x fecesvanger



1 x OmicSnap buisje

Immundiagnostik AG
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim, Germany
Tel.: +49 6251 70190-0
Fax: +49 6251 70190-363
info@immundiagnostik.com
www.immundiagnostik.com

Symbolen toelichting:

	Producent
	Distributie via
	In-vitro diagnostiek
	Bestellingsnummer
	Chargennummer
	Temperatuurbeperking
	Bruikbaar tot
	Niet hergebruiken
	Unique Device Identifier

Omschrijving

Het OmicSnap buisje is een alles-in-één systeem voor het handmatig verzamelen van een bepaalde hoeveelheid feces door leken en maakt stabilisatie en homogenisatie van het monster mogelijk voor verder gebruik in nucleïnezuurgebaseerde procedures in het laboratorium.

Veiligheidsinstructies:

Drink de inhoud van het fecesbuisje niet op, vermijd direct contact met de vloeistof. Na huidcontact de aangetaste gebieden onmiddellijk grondig wassen. Buiten bereik van kinderen houden. Was/desinfecteer altijd de handen na afname van het fecesmonster. Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Immundiagnostik AG en de nationale regelgevende instanties. Deze afnameset is vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met verordening (EU) 2017/746 (IVDR).



Biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18
65552 Limburg-Eschhofen
Tel.: +49 6431 21248 0
Fax: +49 6431 21248 66
info@biovis.de


biovis.de



**ALS U NOG VRAGEN
HEEFT, NEEM DAN
CONTACT OP MET
UW MEDISCHE
ZORGVERLENER.**

HANDLEIDING


1. Plaats de fecesvanger op de toiletbril.

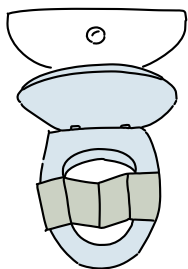

BELANGRIJK

DE FECES MAG NIET IN CONTACT KOMEN MET DE TOILETPOT OF HET WATER.

2. Zet het fecesbuisje rechtop zodat de vloeistof niet kan uitlekken. Schroef het gele deksel van de fecesbuis tegen de klok in los en haal de monsterlans eruit.

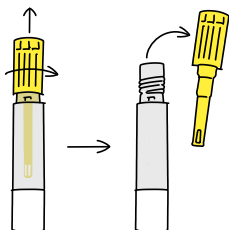


BELANGRIJK


HET WITTE DEKSEL MOET GESLOTEN BLIJVEN EN MAG NIET GEOPEND WORDEN.

3. Prik met monsterlans op minstens 4 plaatsen in de feces totdat het gaatje in de lans gevuld is.

Schep geen feces met de lepel in de lans.

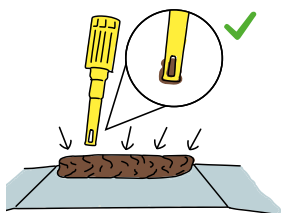


4. Strijk overtollige feces van de voorkant van de monsterlans af.

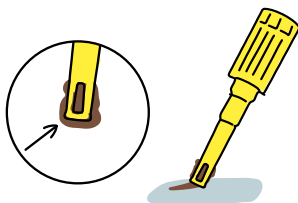


monsterafname - OmicSnap buisje

5. Plaats de monsterlans terug in het buisje en schroef het gele deksel dicht totdat er een weerstand ontstaat en het niet meer open kan.

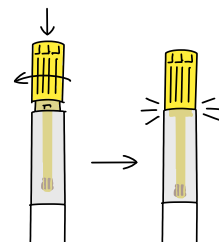


6. Zwenk het buisje vervolgens een paar keer heen en weer.

Niet schudden a.u.b.

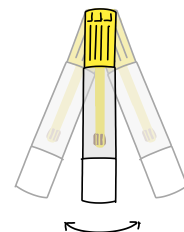


7. Vul nu ook het tweede fecesbuisje. Schroef het buisje met het bruine deksel open en neem met de geïntegreerde lepel op verschillende plekken feces af. Vul het buisje tot de aangegeven streep.

Zorg ervoor dat beide fecesbuisjes beplakt zijn met een barcode voorzien van uw naam en geboortedatum of label de buisjes met uw naam en geboortedatum. Doe nu de gelabelde buisjes in de sealbag en plak deze dicht.

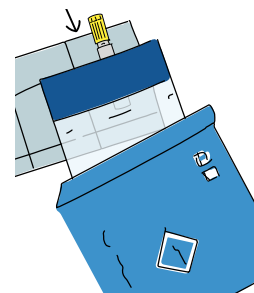

8. Schrijf de datum van afname op het aanvraagformulier en onderteken het formulier. Verpak beide monsterbuisjes in de verzendenvolp en plak deze dicht.

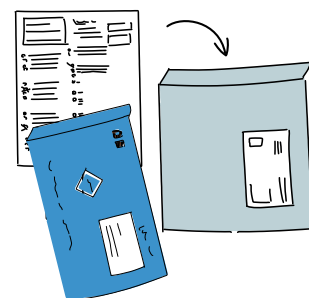

9. Lever de verzendenvolp bij voorkeur in op een postkantoor.

