

Stand: März 2025

## Multierreger-Test (K101) und Schimmelpilzbelastungen (K611)

### Wichtige Hinweise zu Blutentnahme und Kennzeichnung

Sehr geehrte Einsenderin, sehr geehrter Einsender,

gerne möchten wir Ihnen für unsere neuen Zytokin-Release-Tests folgende, wichtige Hinweise geben, um eine präzise Diagnostik gewährleisten zu können.

- **Multierreger-Test (Zytokin-Release) (K101)**
- **Schimmelpilzbelastungen (Zytokin-Release) (K611)**

□	K101	<b>Multierregertest <i>NEU</i></b> <b>(Zytokin-Release)</b>	3CPDA <b>EXP</b>
21 Erreger, hochsensitiv, Differenzierung von akuten und latenten Infektionen (Bakterien: Borrelien, Chlamydien, Mycoplasmen, Yersinien, H. pylori, Strepto., Staphylokokken, Viren: EBV, CMV, HSV-1, HSV-2, VZV, SARS-CoV-2, Pilze: Candida, Aspergillus, Parasiten: Toxoplasmose, Giardia lamblia)			
□	K611	<b>Schimmelpilzbelastungen <i>NEU</i></b> <b>(Zytokin-Release)</b>	3CPDA <b>EXP</b>
12 Schimmelpilze, 13 Mykotoxine, hochsensitiver funktioneller Nachweis. Schimmelpilze: Acremonium (1), Alternaria (1), Aspergillus (4), Cladosporium (2), Fusarium (1), Penicillium (1), Chaetomium (1), Serpula (1), Mykotoxine: Aflatoxine (4), Citrinin, Deoxynivalenol, Fumonisin (2), Gliotoxin, Ochratoxin A, Sterigmatocystin, T-2-Toxin, Zearalenon			

**WICHTIG!**  
Blutentnahme und  
Probeneinsendung für  
das Profil **K611** nur  
**Montag bis  
Mittwoch**

### Hinweise zur Blutentnahme für unsere Zytokin-Release-Tests

- Innerhalb von zwei Stunden vor der Blutabnahme pro Stunde ein Glas Wasser (ca. 200 ml) trinken
- Bei Sportlern 48 Stunden vor Abnahme keine sportliche Tätigkeit
- Patient sollte mindestens 10 Minuten vor Blutabnahme sitzen (Ruhepuls)
- Desinfektionsmittel einwirken und trocknen lassen
- Monovette/Vacutainer sollte immer komplett gefüllt sein (nicht vollständig gefüllte Monovetten/Vacutainer verwerfen)
- Monovette **langsam** aufziehen (Aktivierung der Thrombozyten)
- Monovette/Vacutainer **sofort nach der Entnahme** 3x „über Kopf“ kippen (nicht schütteln)
- **Blut bei Raumtemperatur lichtgeschützt lagern!**

Bitte verwenden Sie folgendes Material und senden Sie 3 Monovetten/Vacutainer ein:



3x CPDA-Monovette (8,8 ml, Sarstedt, REF 01.1610.001)

oder



3x CPDA- Vacuette (9 ml, Greiner, 455056)

## Kennzeichnung der Versandtaschen unserer Zytokin-Release-Tests

Aufgrund der komplexen logistischen Abläufe im Labor ist es erforderlich, die Proben deutlich sichtbar **beidseitig** auf der **äußeren** Versandtasche mit einem Aufkleber zu kennzeichnen. Dadurch können die Proben zeitnah erfasst und innerhalb des erforderlichen Zeitfensters in den automatisierten Aufarbeitungsprozess eingebunden werden.

Sie können den Aufkleber ab sofort auf unserem Materialbestellbogen anfordern:

**„Aufkleber für Funktionelle Zellbiologie“, Artikelbezeichnung: FZBAUF.**

Bitte verwenden Sie den Aufkleber ausschließlich für die Kennzeichnung der Tests:

- **Multierreger-Test (Zytokin-Release) (K101)**
- **Schimmelpilzbelastungen (Zytokin-Release) (K611)**

Bei Rückfragen sind wir natürlich gerne für Sie da.

Sie erreichen uns unter Tel: +49 6431 212480 oder via E-Mail: [info@biovis.de](mailto:info@biovis.de).

Wir bedanken uns schon jetzt bei Ihnen.

Viele herzliche Grüße aus Limburg

**Ihr biovis Team**

