

Die richtige Benutzung des DrySpot biovis® Probenträgers

Damit Ihre Testergebnisse nicht beeinträchtigt werden, berücksichtigen Sie bitte folgende Punkte bei der Benutzung des DrySpot Probenträgers:


1. Die Praxis sollte den DrySpot Probenträger bereits mit einem **Barcode** für Sie beklebt haben. Ist das nicht der Fall, beschriften Sie den Probenträger mit **Name** und **Probenentnahme-Datum**.




2. Wichtig: Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Platzieren Sie das gesamte Probenmaterial, wie auch den DrySpot Probenträger, z. B. auf einem sauberen, trockenen Papier, sodass Sie es nicht kontaminieren und somit die Testergebnisse beeinträchtigen.



3. Das Feld für **Serotonin** und **Fettsäuren** enthalten unterschiedliche Stabilisatoren und können sich daher bräunlich verfärben – das ist normal. Verwenden Sie trotzdem immer das jeweils gekennzeichnete Feld für den entsprechenden Test.

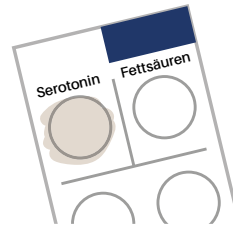

4. Platzieren Sie, z. B. mit einer Minivette, das entnommene Blut **mittig auf das vorgestanzte Feld**. Bitte achten Sie darauf, dass die vorgestanzten Felder **vollständig mit Blut gefüllt** sind.

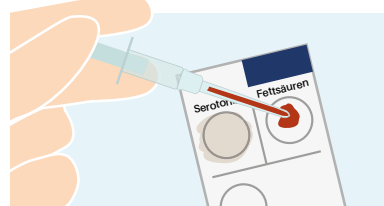


5. Der DrySpot Probenträger sollte für mindestens **1-2 Stunden bei Raumtemperatur** an einem dunklen Ort (z. B. abgedunkeltes Zimmer) trocknen.



1-2
Std.

6. Sobald die Proben getrocknet sind, packen Sie den Probenträger in die Schutzhülle.

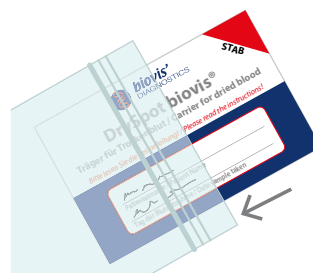

Vielen Dank.