

PRAXISTIPP: Multierreger-Test (K101) und Schimmelpilzbelastungen (K611)

biovis
Material-
bestellbogen




Wichtige Hinweise zur Blutentnahme der Zytokin-Release-Tests:

- Innerhalb von 2 Stunden vor der Blutabnahme pro Stunde ein Glas Wasser (ca. 200 ml) trinken
- Bei Sportlern 48 Stunden vor Blutabnahme keine sportliche Tätigkeit
- Der Patient sollte mindestens 10 Minuten vor der Blutabnahme sitzen (Ruhepuls)
- Desinfektionsmittel einwirken und trocknen lassen
- Monovette/Vacutainer sollte immer komplett gefüllt sein (nicht vollständig gefüllte Monovetten/Vacutainer verwerfen)
- Monovette langsam aufziehen (Aktivierung der Thrombozyten)
- Monovette/Vacutainer sofort nach der Entnahme 3 x „über Kopf“ kippen (nicht schütteln)
- Blut bei Raumtemperatur lichtgeschützt lagern!

Folgendes Material wird für die Zytokin-Release-Tests benötigt:



3x CPDA-Monovette
oder

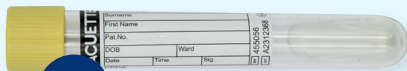

3x CPDA-Vacurette



Bitte keine BD Vacutainer Glas-ACD

☐ K101 **Multierreger-Test** **NEU** 3CPDA **EXP**
(Zytokin-Release)



Blutentnahme und
Probeneinsendung
für **K101** nur

Montag bis Donnerstag

☐ K611 **Schimmelpilzbelastungen** **NEU** 3CPDA **EXP**
(Zytokin-Release)



Blutentnahme und
Probeneinsendung
für **K611** nur

Montag bis Mittwoch

Kennzeichnung der Versandtaschen der Zytokin-Release-Tests:

Aufgrund der komplexen logistischen Abläufe im Labor ist es erforderlich, die Proben deutlich sichtbar **beidseitig** auf der **äußeren** Versandtasche mit dem roten Aufkleber zu kennzeichnen. Dadurch können die Proben zeitnah erfasst und innerhalb des erforderlichen Zeitfensters in den automatisierten Aufarbeitungsprozess eingebunden werden.

Die Aufkleber für die Zytokin-Release-Tests können Sie auf unserem Materialbestellbogen anfordern.

Vielen Dank.



biovis.de

FOLGEN SIE UNS



biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen
info@biovis.de | biovis.de



biovis'
DIAGNOSTICS